



## SOLUȚIE DE PEROXID DE HIDROGEN CU EFECT SINERGIC DEZINFECTEAZĂ ȘI CURĂȚĂ ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ

### Incidin™ OxyFoam NG & Incidin™ OxyWipe NG

#### SOLUȚIE PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE GATA DE UTILIZARE

Formula avansată a Incidin™ OxyFoam NG și Oxywipe NG oferă beneficiile unei soluții patentate pe bază de peroxid de hidrogen împreună cu efectul sinergic al fenoxietanolului;

- Formulă eficientă fără parfum și colorant
- Curățare și dezinfectie într-o singură etapă, lăsând suprafața vizibil curată
- Formulă pe bază de ingrediente biodegradabile

Caracteristicile produselor Incidin OxyFoam NG și Oxywipe NG le fac să fie adecvate pentru utilizare pe o gamă largă de suprafețe din unitățile sanitare și un produs ideal pentru terapie intensivă și alte zone cu risc ridicat.

Acest aspect permite ca produsele să fie utilizate în practică conform protocoalelor dumneavoastră, oferind rezultatele de dezinfectie și nivelul de conformitate obligatoriu pentru o dezinfectie eficientă în vederea limitării răspândirii agenților patogeni.



\*Brevet European EP1987121

**ECOLAB®**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™

# Incidin™ OxyFoam NG

## SOLUȚIE PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE GATA DE UTILIZARE

### EFICACE

- Spectru larg de eficacitate și timp de contact redus combinat cu proprietățile unui agent de curățare delicat

### SIGUR

- Compatibilitate extinsă cu materialele, inclusiv suprafețe sensibile la alcool precum ABS, plexiglas PMMA

### CONVENABIL

- Curăță și dezinfectează într-o singură etapă

### CARACTERISTICI

- Spumă densă pentru o aderență mai bună pe suprafață (750 ml)
- Poate fi utilizat împreună cu Incidin Dry Wipes (5L)

### PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE CA DISPOZITIV MEDICAL ȘI BIOCID

EFICACITATE	TIMP DE CONTACT
Dezinfecția suprafețelor în conformitate cu metoda VAH 2015 (incl. EN 16615), condiții de murdărie	
Bactericid, Levuricid	1 min
EN 16615* (bactericid, levuricid)	1 min
EN 16615* (fungicid)	5 min
EN 16615* (tuberculocid/micobactericid)	15 min
EN 13727* (bactericid)	1 min
EN 13624* (levuricid)	2 min
EN 13624* (fungicid)	15 min
EN 14348* (tuberculocid/micobactericid)	30 min
EN 14476* (virusuri anvelopate / virucid limitat)	5 min
EN 14476** (spectru virucid limitat conform)	30 min
EN 14476** Adenovirus	30 min
EN 14476** Norovirus (MNV)	30 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	5 min
Eficace împotriva virusurilor anvelopate în conformitate cu recomandările RKI 2022***	30 sec

\* condiții de murdărie    \*\* condiții de curățenie    \*\*\* DVV 2015 Test în suspensie

### DISPOZITIV MEDICAL ȘI BIOCID - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți eticheta și instrucțiunile de utilizare ale produsului.

## DOMENIUL DE UTILIZARE



### Dispozitiv medical:

Detergent dezinfectant gata de utilizare, pentru dispozitive medicale neinvazive și neimersabile conform Directivei 93/42/EEC.

### Biocid:

Soluție gata de utilizare pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor, ca biocid: pentru suprafețe generale.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Pentru flaconul de 750ml:

Produs gata de utilizare.

Aplicați produsul, asigurând contactul cu întreaga suprafață și apoi ștergeți cu un șervețel curat și lăsați să se usuce. Ca și alternativă, aplicați produsul pe un șervețel curat, ștergeți suprafața și lăsați să se usuce. Respectați timpul de contact și condițiile indicate pentru activitatea antimicrobiană necesară. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la agenții oxidanți, cum ar fi: marmură, cupru sau alamă.

### Dispozitiv medical:

Clătirea nu este necesară, cu excepția cazului în care zonele de tratat sunt destinate să intre în contact cu pielea sau mucoasele. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale.

### Pentru canistra de 5L:

Produs gata de utilizare ce se poate folosi împreună cu Incidin Dry Wipes (instrucțiunile detaliate pentru pregătirea șervețelelor uscate sunt afișate pe ambalajul Incidin Dry Wipes).

Ștergeți foarte bine întreaga suprafață și lăsați să se usuce. Respectați timpul de contact și condițiile indicate pentru activitatea antimicrobiană necesară.

A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la agenții oxidanți, cum ar fi: marmură, cupru sau alamă. .

### Dispozitiv medical:

Clătirea nu este necesară, cu excepția cazului în care zonele de tratat sunt destinate să intre în contact cu pielea sau mucoasele. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale..

## INGREDIENTE

Peroxid de hidrogen (CAS 7722-84-1): 2,0 g/100g;  
Fenoxietanol (CAS 122-99-6): 0,5 g/100g

## DEPOZITARE

A se depozita între +5°C și +25°C.

Valabilitate produs după deschidere:

Data de expirare.



DOAR PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI

# Incidin™ OxyWipe NG

## ȘERVEȚELE PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE, GATA DE UTILIZARE

### EFICACE

- eficacitate cu spectru larg și timpi scurți de contact combinate cu proprietățile unui agent de curățare delicat

### SIGUR

- compatibilitate largă a materialelor, inclusiv suprafețe sensibile la alcool precum ABS, plexiglas PMMA

### CONVENABIL

- Curăță și dezinfectează într-o singură etapă

### CARACTERISTICI

- Șervețele de înaltă calitate din polipropilenă cu textură neregulată (50 g/m<sup>2</sup>) pentru o aplicare eficientă

### PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE CA DISPOZITIV MEDICAL ȘI BIOCID

EFICACITATE	TIMP DE CONTACT
Dezinfecția suprafețelor în conformitate cu metoda VAH 2015 (incl. EN 16615), condiții de murdărie	
Bactericid, Levuricid	1 min
EN 16615* (bactericid, Levuricid)	1 min
EN 16615* (fungicid)	5 min
EN 16615* (tuberculocid/micobactericid)	15 min
EN 13727* (bactericid)	1 min
EN 13624* (levuricid)	2 min
EN 13624* (fungicid)	15 min
EN 14348* (tuberculocid/micobactericid)	30 min
EN 14476* (virusuri anvelopate / virucid limitat)	5 min
EN 14476** (spectru viruvid limitat în conformitate cu)	30 min
EN 14476** Adenovirus	30 min
EN 14476** Norovirus (MNV)	30 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	5 min
Eficace împotriva virusurilor anvelopate în conformitate cu recomandările RKI 2022***	30 sec

\* condiții de murdărie    \*\* condiții de curățenie    \*\*\* DVV 2015 Test în suspensie

### DISPOZITIV MEDICAL ȘI BIOCID - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți eticheta și instrucțiunile de utilizare ale produsului.

## DOMENIUL DE UTILIZARE



### Dispozitiv Medical:

Șervețele gata de utilizare pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor și dispozitivelor medicale neinvazive și neimersabile, conform Directivei 93/42/CEE.

### Biocid:

Șervețele gata de utilizare pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor, ca biocid: pentru suprafețe generale.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Șervețel gata de utilizare.

Scoateți un șervețel din recipient. Stergeți bine suprafața, asigurându-vă că aceasta este complet acoperită și lăsați să se usuce. Respectați timpul de contact și condițiile indicate pentru activitatea antimicrobiană necesară. Închideți capacul recipientului după utilizare. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la agenții oxidanți, cum ar fi: marmură, cupru sau alamă.

### Dispozitiv Medical:

Clătirea nu este necesară, cu excepția cazului în care zonele de tratat sunt destinate să intre în contact cu pielea sau mucoasele.

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale.

## INGREDIENTE

Soluția de împregnare: 100g conține următoarele ingrediente active: Peroxid de hidrogen (CAS 7722-84-1): 2,0 g ; Fenoxietanol (CAS 122-99-6): 0,5 g

## DEPOZITARE

A se depozita între +5°C și +25°C.

Valabilitate produs după deschidere: 3 luni.



DOAR PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI.

## Incidin™ OxyFoam NG

### INFORMAȚII DE AMBALARE ȘI COMANDĂ

PRODUS	AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Incidin™ OxyFoam NG	6 x 750ml	3137196
Incidin™ OxyFoam NG	2 x 5L	3137296
Robinet dozare (DIN 51) pentru canistra de 5L	1	XXXXXX

## Incidin™ OxyWipe NG

### INFORMAȚII DE AMBALARE ȘI COMANDĂ

PRODUS	AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Incidin™ OxyWipe NG	6 x 100 șervețele (20 x 20 cm)	3114110
Incidin™ OxyWipe NG XL	6 x 50 wipes (25 x 37 cm)	XXXXXX
Dispenser de perete pentru Incidin™ OxyWipe NG (Oțel inoxidabil)	6 x 1	100 338 77
Suport de perete pentru pachetele de șervețele (polipropilenă durabilă)	12 x 1	100 576 86

ECOLAB SRL  
Centrul de Afaceri IDEO  
Șos Pacurari, nr 138  
700545, Iasi, Romania



LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

**ECOLAB®**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™