



## Incidin® Liquid

Dezinfectant gata de utilizare pe baza de alcool

## RAPID. FARA REZIDUURI.

Incidin liquid imbina modul de utilizare simplu cu un timp de contact extrem de redus. Combinatia de alcooli permite uscarea rapida fara a lasa reziduuri critice. Mai mult, Incidin liquid ofera utilizatorilor o siguranta sporita prin spectrul larg de eficacitate, inclusiv impotriva TB si HBV.



# Incidin<sup>®</sup> Liquid

Dezinfectant gata de utilizare pe baza de alcool

Oferta noastra	Beneficiile dumneavoastra
Eficace impotriva bacteriilor inclusiv TB, levrurilor, virusurilor inelute, HBV, HCV, HIV, precum si impotriva Norovirusului	Recomandat pentru unitatile de terapie intensiva, zonele cu risc inalt si in situatii epidemiologice speciale
Flacon cu pulverizator gata de utilizare	Usor de manevrat, poate fi utilizat prin pulverizare sau aplicare si stergere
Sunt disponibile multiple teste de compatibilitate	Siguranta suplimentara pentru suprafetele dumneavoastra



Dezinfectant de suprafete, pe baza de alcool, pentru dispozitive medicale ☒ 0297



Dezinfectant pe baza de alcool, pentru toate tipurile de suprafete

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Utilizati produsul nediluat pe un servetel curat, stergeti suprafetele rezistente la alcool si lasati sa actioneze sau pulverizati suprafata de la circa 30 cm (max. 40 ml/m<sup>2</sup>) si lasati sa se usuce. Umeectarea completa a intregii suprafete de dezinfectat este esentiala.

## INGREDIENTE

100g contin urmatoarele substante active: 35 g 2-propanol, 25g 1-propanol.

## REZULTATE TESTARI MICROBIOLOGICE SI VIRUSOLOGICE

Eficacitate produs nediluat	Timp de contact
Dezinfectia suprafetelor conform DGHM (2001), cu si fara actiune mecanica; bactericid, levuricid, tuberculocid (conditii de curatenie si de murdarie)	5 min
Dezinfectia rapida conform DGHM (2001); bactericid, levuricid, tuberculocid (conditii de curatenie si de murdarie)	1 min
EN 13727 bactericid (conditii de curatenie si de murdarie)	1 min
EN 13624 levuricid, fungicid (conditii de curatenie si de murdarie)	1 min
EN 14348 tuberculocid (conditii de curatenie si de murdarie)	1 min
Eficacitate virucida impotriva virusurilor inelute (incl. HBV, HIV, HCV) conform recomandarilor RKI 1/2004	1 min
Adeno	5 min
Rota	1 min
Papova	10 min
Noro (tested with murine Norovirus)	10 min

## AMBALARE SI DATE PENTRU COMANDA

**Incidin<sup>®</sup> Liquid** 3042450  
Flacon 12x1L

**Incidin<sup>®</sup> Liquid** 3042470  
Canistra 2x5L

Numai pentru utilizatori profesionali. Utilizati dezinfectantii in siguranta. Cititi intotdeauna informatiile despre produs inainte de utilizare.



Incidin<sup>®</sup> Liquid

**Ecolab Healthcare**  
Clean. Safe. Healthy.

### Ecolab SRL.

Centrul de afaceri "IDEO", Sos. Pacurari nr.  
138 et. 2, 700545 - Iasi Tel.: 0232222210  
www.ecolab.com  
© 2009 Ecolab Inc. Toate drepturile rezervate.



**ECOLAB**  
**DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am  
Rhein+49 (0) 2173 599 0

