



CURATAREA POATE FI ATAT DE SIMPLA SI EFICIENTA

Sekusept™ MultiEnzyme

PRE-CURATAREA ENZIMATICA A DISPOZITIVELOR MEDICALE INCLUSIV A ENDOSCOAPELOR FLEXIBILE

Curatarea instrumentarului medical si a endoscoapelor este o faza preliminara esentiala pentru o dezinfectie eficienta.

Imbinarea celor 4 enzime cu surfactantii si celelalte ingrediente din Sekusept MultiEnzyme, contribuie la obtinerea unor performante excelente de curatare pentru toate tipurile de instrumentar medical, inclusiv endoscoapele flexibile.

Sekusept MultiEnzyme:

- are o buna compatibilitate cu materialele datorita PH-ului neutru
- timpi redusi de procesare intrucat nu mai este necesara re-curatarea
- are un cost eficient datorita concentratiei reduse in solutie de lucru



Sekusept™ MultiEnzyme

Pre-curatarea enzimatica a dispozitivelor medicale, inclusiv a endoscoapelor flexibile



Sekusept MultiEnzyme
Flacon 2l



Sekusept MultiEnzyme
Canistra 6l

RAPID

Sekusept MultiEnzyme realizeaza o curatare eficienta si riguroasa. Acesta va ajuta sa reducati timpii de procesare si sa evitati repetarea procedurii de curatare.

SIMPLU

Sekusept MultiEnzyme imbina in mod unic surfactantii cu proteaza, lipaza si amilaza contribuind astfel la dizolvarea proteinelor, grasimilor si a amidonului. Formula cu spumare redusa ajuta la o clatire facila si o vizibilitate ridicata asupra instrumentelor. Culoarea albastru transparent marcheaza adaugarea produsului.

ECONOMIC

Sekusept MultiEnzyme poate fi utilizat in concentratii scazute, intre 0.3% (3ml / Litru) si 2% (20ml / Litru), determinand un consum redus de produs pe ciclu de procesare.

INFORMATII COMANDA

PRODUS	AMBALARE	COD COMANDA
Sekusept MultiEnzyme flacon dozare cu masura	4 x 2 L	3046620
Canistra Sekusept MultiEnzyme	1 x 6 L	XXXXXX

DOMENIU DE UTILIZARE

Special conceput pentru curatarea manuala a instrumentarului medical, inclusiv endoscoapele flexibile si accesoriile, instrumentarul chirurgical si endoscoapele rigide.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

In functie de tipul si gradul de murdarire, preparati o solutie de 0.3% (3ml / L) - 2% (20ml / L) cu apa potabila curata. Imersati instrumentele asigurandu-va ca toate suprafetele sunt complet umectate. Curatati reperele in conformitate cu instructiunile producatorului de instrumentar, inclusiv prin actiune mecanica (periere, stergere, etc) pana cand acestea sunt vizibil curate. Daca se utilizeaza in bai de ultrasunete, asigurati-va ca aceasta este acoperita pe durata sonificarii.

Clatiti cu apa de cel putin calitatea celei potabile si ulterior uscati suprafetele externe si canalele interne (a endoscoapelor).

INGREDIENTE

proteaza, lipaza, amilaza, surfactanti, inhibitori de coroziune, solventi, agenti auxiliari, emulsificatori

DEPOZITARE

Periculos - respectati precautiunile de utilizare (in conformitate cu regulile Europene in vigoare cu privire la clasificarea si etichetarea produselor). Depozitare: intre +5°C si +25°C.

CERTIFICATE SI DOCUMENTATIE

Documentatia si certificatele sunt puse la dispozitie la cerere.

DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZATI IN SIGURANTA

Cititi cu atentie informatiile de pe eticheta si Fisa Tehnica a produsului



DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.